



A

Extérieur

Avec surplus de couture

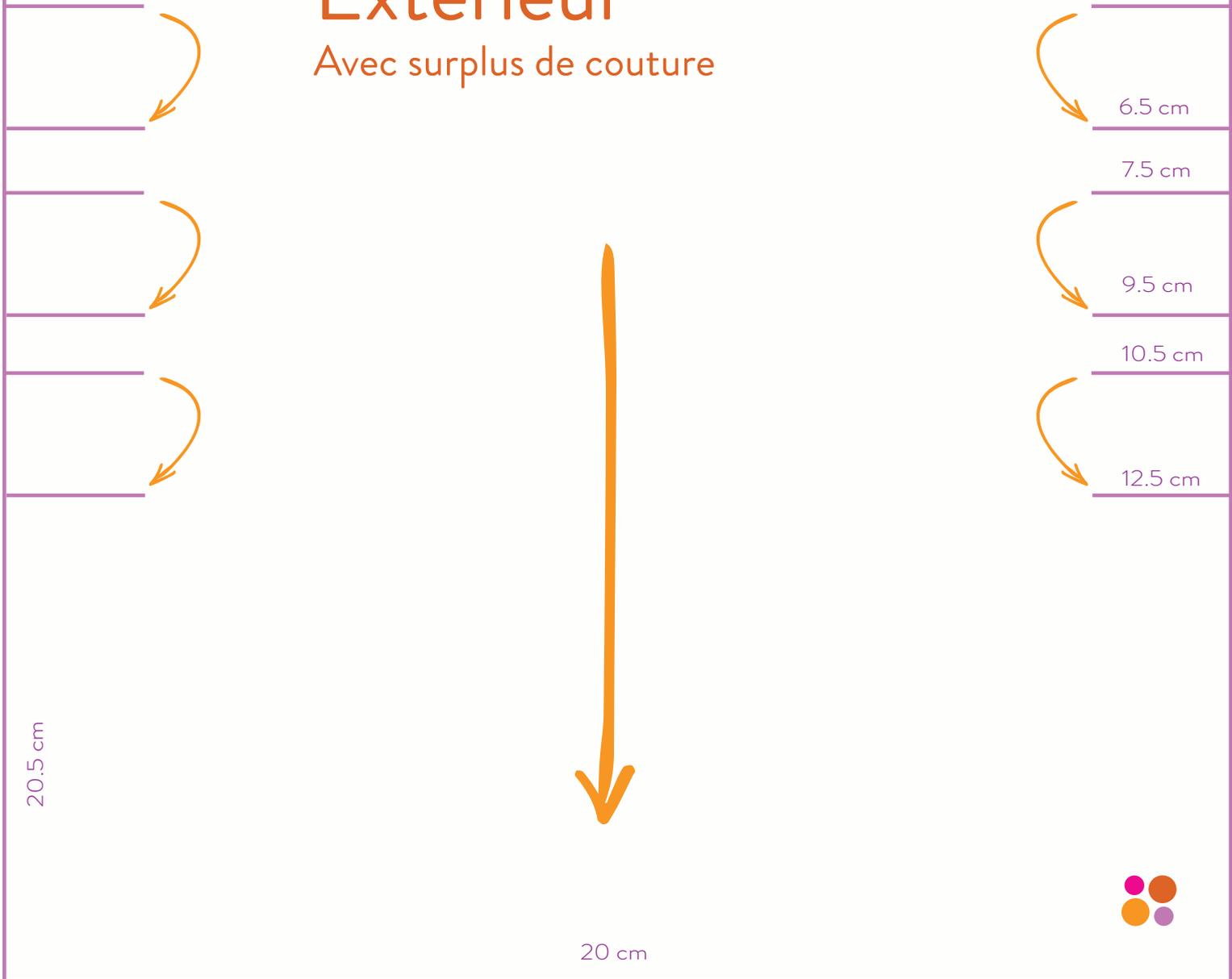

Carré de contrôle

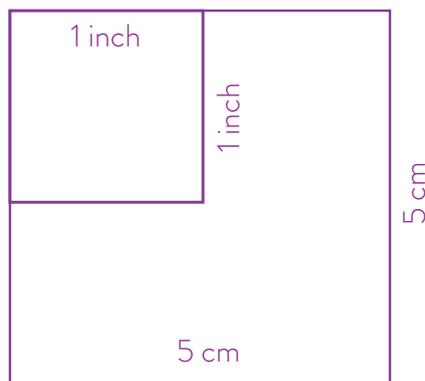


Attention : pour être certain de respecter les mesures exactes, veuillez imprimer ce document au format A4 en « taille réelle » et non « taille ajustée », ce qui est souvent proposé par défaut !

B


Intérieur

Avec surplus de couture

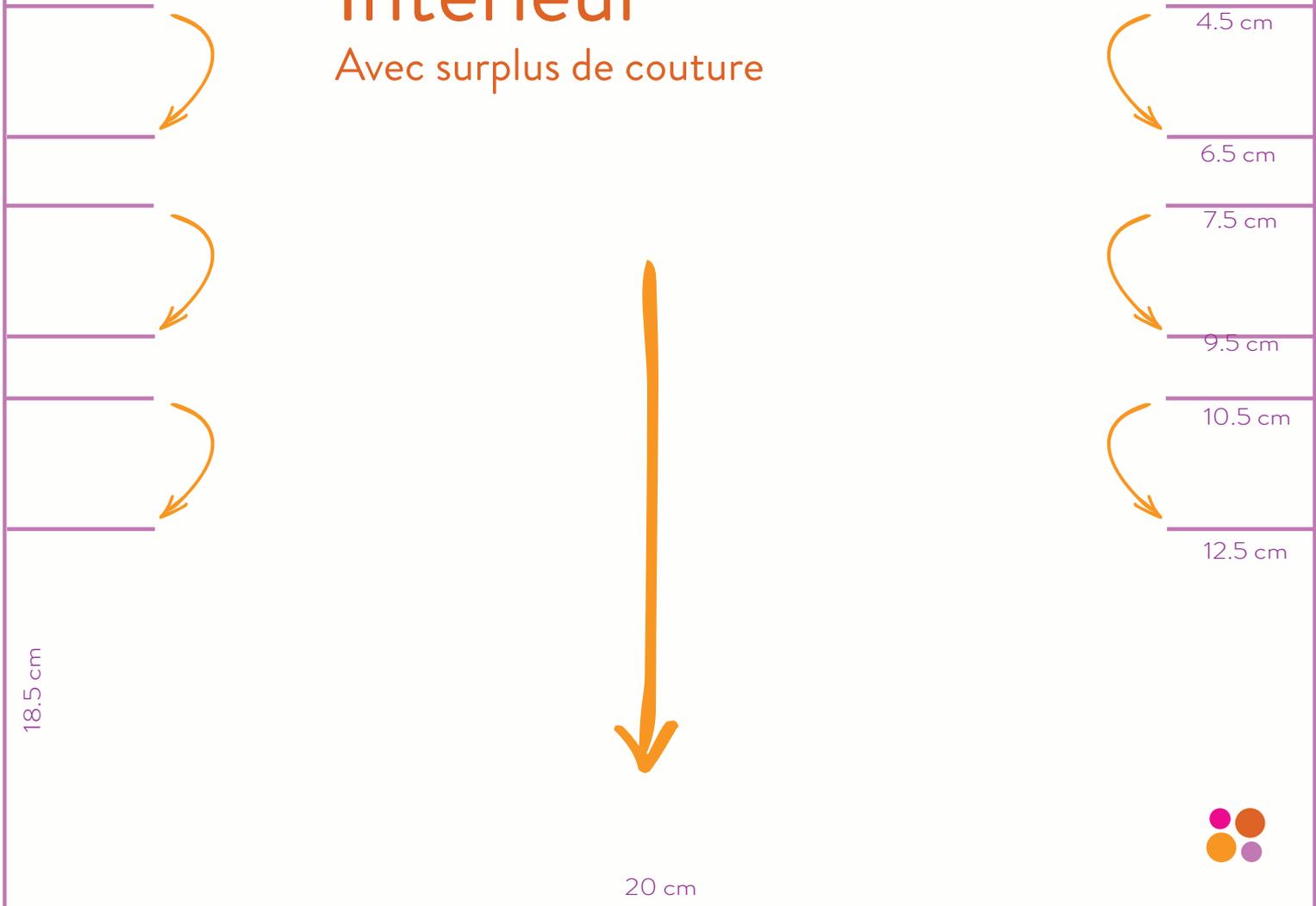





Marche à suivre

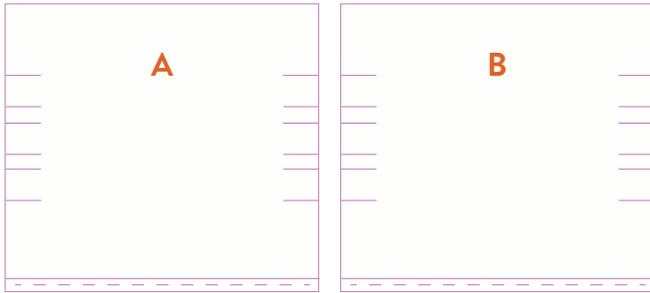


Réalisez un ourlet de 0.5 cm au bas de la pièce extérieure (A), et au bas de la pièce intérieure (B)

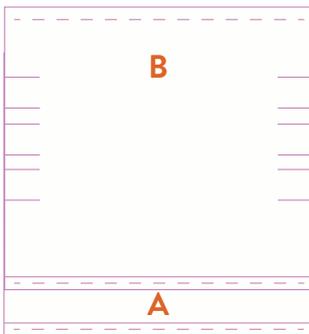

Assemblez le haut des pièces A et B à 0.5 cm du bord, endroit contre endroit. Ce côté correspond au haut du masque, qui sera plié sur le nez.

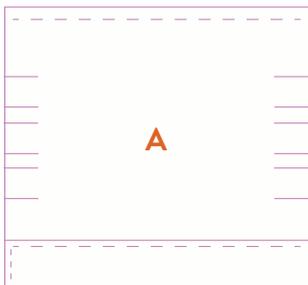


Repliez une seconde fois le bas de la pièce A à 2 cm. Ne cousez pas ce second ourlet mais fixer le pli par quelques point des deux côtés et repassez-le si vous le souhaitez. La fonction de ce pli est de maintenir le filtre en place.

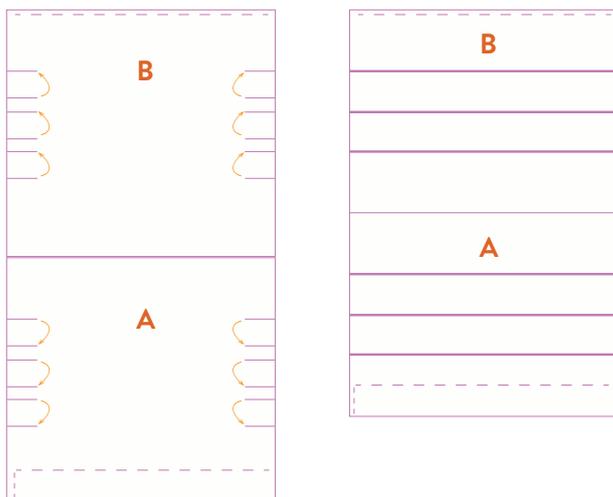


Épinglez les plis au niveau des encoches pratiquées sur les côtés des pièces A et B, comme indiqué sur le patron, en vérifiant bien dans quelle direction se trouvent les flèches. Fixer les plis par une couture (à 0.3 cm du bord).



Marche à suivre

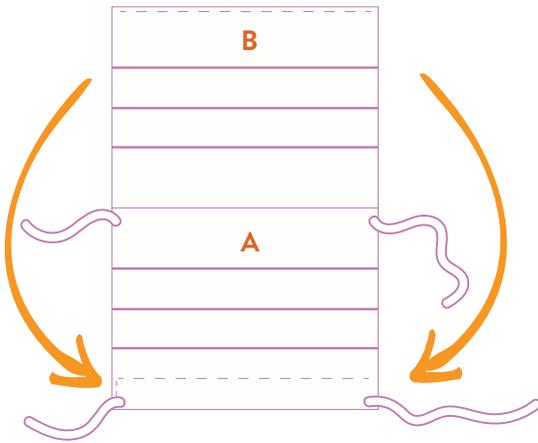

Épinglez une extrémité de chacun des quatre rubans aux quatre coins de la pièce A. Alignez le bout du ruban avec le bord du tissu, en disposant le reste du ruban vers l'intérieur.

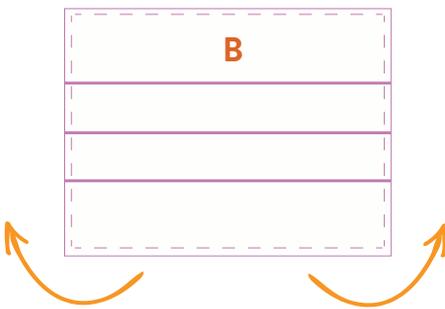

Pliez les pièces A et B l'une sur l'autre, endroit contre endroit, avec les rubans entre les deux épaisseurs de tissu, et assemblez les côtés du masque. Retournez votre ouvrage sur l'endroit.

Introduisez le matériel filtrant par l'ouverture du bas du masque. Il sera maintenu en place par le pli au bas de la pièce A.

Placez le haut du masque sur votre nez puis attachez les rubans du haut derrière votre tête (en passant au-dessus des oreilles) et ceux du bas dans la nuque. Veillez à ce que le masque s'ajuste parfaitement sur votre visage, en haut et en bas.